

Mode d'emploi d'Epipen^{MD} et d'Epipen Jr^{MD}

Retirez EpiPen^{MD} de son tube de rangement et suivez les deux étapes faciles suivantes :

1

Bleu vers
le plafond



2

Orange
pour
l'injection



- Saisissez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas.
- Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- Poussez fort contre la jambe jusqu'à ce que vous entendiez un « pop » qui signale le début de l'injection
- Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.

Après l'administration d'Epipen^{MD}, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.



Éprouvé depuis plus de 35 ans.



www.epipen.ca/fr-ca

Scannez ici pour
accéder à la vidéo sur
l'utilisation d'Epipen^{MD}



VIATRIS[®]

Informez-vous. Préparez-vous.



Visitez le site EpiPen.ca pour :



www.epipen.ca/fr-ca

- En savoir plus sur la façon et le moment d'utiliser un auto-injecteur EpiPen^{MD}
- Commander **GRATUITEMENT** des sacs de taille ou des trousse de démonstration EpiPen^{MD}, entre autres
- Vous inscrire **GRATUITEMENT** au service de rappel des dates de péremption;
- Parcourir la galerie vidéo EpiPen^{MD} et la FAQ.

Autres ressources

- Allergies Alimentaires Canada : foodallergycanada.ca
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario : allergyasthma.on.ca
- Allergies Québec : allergies-alimentaires.org
- L'Association des Allergologues et Immunologues du Québec : allerg.qc.ca

EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.

EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à la salle d'urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Pour de l'information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires ainsi que la posologie et l'administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

• Numéro sans frais : 1 877 EPIPEN1 (1 877 374-7361)

EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.

VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.

©2025 Viatris Inc. Tous droits réservés.
CA-EPI-2024-00038F - OC2024



VIATRIS[®]