

Bleu vers le plafond. Orange pour l'injection.

Mode d'emploi d'EpiPen^{MD} et d'EpiPen Jr^{MD} (épinéphrine)

Retirez EpiPen^{MD} de son tube de rangement et suivez les deux étapes faciles suivantes :



1 Bleu vers le plafond

- Saisissez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas.



2 Orange pour l'injection

- Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- Poussez fort contre la jambe jusqu'à ce que vous entendiez un « pop » qui signale le début de l'injection.
- Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.

Couvre-aiguille intégré

Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement après l'injection pour couvrir l'aiguille et assurer que celle-ci n'est jamais exposée.

Après l'administration d'EpiPen^{MD}, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou à un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.

Visitez le site EpiPen.ca/fr-ca

EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, incluant les personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.

EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à la salle d'urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire l'étiquette et suivre les instructions. Pour de l'information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires ainsi que la posologie et l'administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

Numéro sans frais : 1 877 EPIPEN1 (1 877 374-7361)



Éprouvé depuis plus de 35 ans.

EpiPen^{MD} and EpiPen Jr^{MD} sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatrís. VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatrís. ©2025 Viatrís Inc. Tous droits réservés. CA-EPI-2024-00046F – OC2024



www.EpiPen.ca/fr-ca
Scannez ici pour accéder à la vidéo sur l'utilisation d'EpiPen^{MD}

