

Mode d'emploi des auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD}

Retirez l'auto-injecteur EpiPen^{MD} de son tube de rangement et suivez les deux étapes faciles suivantes :

1. Bleu vers le plafond.



- Tenez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit; ne le pliez pas et ne le tordez pas.

2. Orange pour l'injection.



- Placer le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- Avec un mouvement de balancement, poussez fermement l'auto-injecteur dans la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.



Éprouvé depuis plus de 25 ans.



Après l'administration, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.

Informez-vous. Préparez-vous.



Visitez le site pour les consommateurs
www.EpiPen.ca pour :

- en savoir plus sur la façon et le moment d'utiliser un auto-injecteur EpiPen^{MD};
- commander **GRATUITEMENT** des sacs de taille ou des trousse de démonstration EpiPen^{MD}, entre autres;
- vous inscrire **GRATUITEMENT** au service de rappel des dates de péremption et vous abonner aux bulletins;
- parcourir la galerie vidéo EpiPen^{MD} et la FAQ.


Autres ressources

- Allergies Québec : allergies-alimentaires.org
- L'Association des Allergologues et Immunologues du Québec : allerg.qc.ca
- Allergies Alimentaires Canada : foodallergycanada.ca
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario : allergyasthma.on.ca

Les auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.

Les auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à la salle d'urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Pour de l'information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires ainsi que la posologie et l'administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

© 2020 Pfizer Canada SRI, Kirkland (Québec) H9J 2M5 • Numéro sans frais : 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361) • EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont des marques déposées de Mylan, Inc. dont la licence exclusive a été accordée à Mylan Specialty, L.P., société affiliée détenue en propriété exclusive; sous-titulaire, Pfizer Canada SRI, Kirkland (Québec) H9J 2M5

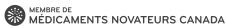

PP-EPI-CAN-0261-FR



Éprouvé depuis plus de 25 ans.